



## CARACTÉRISTIQUES

- Mousse CMHR pour alléger la pression
- Coutures thermo-soudées résistantes à l'eau qui empêchent l'infiltration de liquide  
- conviennent pour l'incontinence



### MATÉRIAU / FABRICATION

Le matelas possède un extérieur léger, résistant à l'eau et facile d'entretien. Il possède d'excellentes propriétés hygiéniques et sécuritaires grâce à ses coutures thermo-collées qui previennent des tentatives de détériorations et de l'infiltration de liquides. L'intérieur du matelas est en mousse CMHR (combustion modified high resillience) pour une utilisation sécurisée pour le patient et le personnel.

### NORMES DE CONTRÔLES

- Test ignifuge selon la norme BS 7177:2008 source 5

### OPTIONS

- D'autres tailles disponibles
- Des matelas peuvent avoir l'oreiller intégré

1MNM3-68-7-C5  
12,5 H | 210 L | 91,5 l (cm)

1MNM4-63-7-C5  
19 H | 190 L | 120 l (cm)

1MNM46-63-7-C5  
19 H | 190 L | 137 l (cm)

### COLORIS / FINITION

Extérieur en Purple en standard

### ENTRETIEN

Pour les salissures superficielles, utilisez une lingette jetable et une solution tiède de détergent neutre. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs et désinfecter à l'aide d'une solution d'hyperchlorite de sodium à 0,1 % (1 000 parties par million de chlore). Éviter l'utilisation de nettoyeurs biologiques ou à base de phénol. Tous les agents de nettoyage et désinfectants doivent être soigneusement rincés et le matelas séché avant d'être stocké ou réutilisé. Il est conseillé de retourner le matelas de haut en bas et d'un côté à l'autre régulièrement pour permettre à la mousse de se reconstituer et de prolonger la durée de vie du matelas.

### GARANTIE

2 ans de garantie